

2016年9月26日改訂（第4版 新記載要領に基づく改訂）
2015年8月28日改訂（第3版）
2010年1月7日改訂（第2版）

届出番号:13B1X10089000517

機械器具 58 整形用器具器械 歯科技工用機器
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

ケラター アバットメントアナログ

【形状・構造及び原理等】

【概要】

アナログ：アルミニウム

コーピング：アルミニウム

ブラックキャップ：ポリエステル

【形状・構造等】

下記外観写真のとおり

アナログ



コーピング



【原理】

ケラターアタッチメントの代わりに本製品を装着し、印象を採ることによりケラターアタッチメントの装着状態が模型上に再現できる。

【使用目的又は効果】

ケラターアタッチメントの装着状態を模型上に再現するためのダミー。上部構造作成時に用いる器具。

【使用方法】

- 1) コーピングをアタッチメントのメールに装着する。
- 2) 通法に従い印象を採得する。
- 3) 印象内面のコーピングにアナログを装着する。
- 4) 印象に石膏を注入する。
- 5) 石膏が硬化したことを確認した後印象材から外す。

【使用上の注意】

1. 歯科医療有資格者以外は使用しない事。
2. 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
3. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがある。
4. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し、乾燥させてから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因になる事がある。
5. 取扱上の注意
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel : 03-5827-1380 Fax : 03-5827-1381

製造業者：KJ MEDITECH Co., Ltd. (Korea)