

2017 年 3 月 10 日改訂（第 4 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号：13B1X10089000521

2015 年 4 月 21 日改訂（第 3 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料

2009 年 12 月 7 日改訂（第 2 版）

一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

ロビンソンタイプブラシ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕補綴物の研磨に用いるブラシ。

軸部：炭素鋼、ニッケルメッキ

ブラシ部：ヤギ毛

〔形状・構造等〕

種類：2 種類 #9, #11

ブラシ部直径：15mm(#9) 18mm(#11)

軸部直径：2.35mm

全長：43mm



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel:03-5827-1380 Fax:03-5827-1381

製造業者：BH Medical Products Co., Ltd.(中国)

〔原理〕

歯科用ハンドピースに装着し、回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

歯科用ハンドピースに装着し、補綴物等の研磨に用いるブラシ。

【使用方法等】

- 1) 歯科用ハンドピースに本品を装着する。
 - 2) 本品が確実に固定されている事を確認し、試運転する。
 - 3) 振れ等が無ければ、本品を補綴物に軽く押し当て、研磨する。
- 使用回転数：5,000～12,000rpm

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - ・ 本製品は歯科用ハンドピースに取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
 - ・ 術者は保護眼鏡を必ず着用すること。
 - ・ 回転不良・装着時のふれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。
2. その他の注意
 - ・ 本品を表記以外の用途に使用しないこと。

【取り扱い上の注意】

- ・ 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は破損、ヒビ、傷、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。