

2021 年 5 月 10 日改訂（第 4 版）

届出番号：13B1X10089000603

2016 年 7 月 25 日改訂（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）

2012 年 10 月 22 日改訂（第 2 版）

機械器具 30 結紮器及び縫合器

2010 年 9 月 27 日作成（第 1 版）

一般医療機器 持針器 12726010

マイクロニードルホルダー

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体：ステンレススチール

先端部：タングステン加工

〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り

種類：マイクロニードルホルダー TC 直 17.5cm (h41.010.17TC)



マイクロニードルホルダー TC 曲 18cm (h41.011.17TC)



クロスアクションマイクロニードルホルダー 17.5cm TC (h41.017.17)



〔原理〕

先端部を利用して縫合時などの際に針等を把持する。

【使用目的又は効果】

縫合時に縫合針を把持するために用いる持針器。

【使用方法等】

- 1) 使用前に滅菌済みである事を確認する。
(オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守)
 - 2) 先端部を開閉させ、縫合糸や縫合針を把持する。
- * ストッパーは必要に応じて使用する事で先端部の把持が継続される。

【使用上の注意】

1. ステンレススチール使用。
素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
2. 家庭用洗剤使用上の注意。
家庭用洗剤は、金属を腐食させることがある。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を勧める。
3. 機能水の使用禁止。
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
4. 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起す恐れがあるので注意する事。
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
 - ・使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
 - ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
 - ・洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。
- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。（オートクレーブ温度 135℃以下）。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥さ

せてから保管すること。

水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

5. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。

腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

6. 保管上の注意。

「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしない事。又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしない事。
- ・先端作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒーティングしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Helmut Zepf Medizintechnik GmbH (Germany)