

2021 年 1 月 18 日改訂（第 5 版）

届出番号:13B1X10089000636

2017 年 3 月 5 日改訂（第 4 版 新記載要領に基づく改訂）

2015 年 9 月 30 日改訂（第 3 版） 歯科材料 09 歯科用研削材料

2014 年 4 月 16 日改訂（第 2 版） 一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

オコクリーナー

【形状・構造及び原理等】


〔概要〕

本 体：合成樹脂、グラスファイバー

〔形状・構造等〕

種類： 5 種類

#1, #2, #3, #4, #5

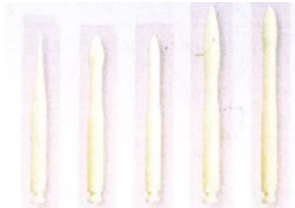

#1, 2, 3（スタンダード、長さ 25mm）

#4, 5（ペリオ用、長さ 28mm）

〔原理〕

本品を歯科用コントラングルハンドピースに装着し、
回転させ歯の表面を研削する。

【使用目的又は効果】

歯面及び歯根面、充填物の研磨、歯石、沈着物、着色の除去等に用いる。エナメル質や軟組織へのダメージを最小限に抑え、超音波スケーリング後のクリーニングやコンポジット充填物の研削が可能。又、補綴物の余剰セメント除去等に用いる。

- * （ペリオ）スケーリング後のルートプレーニング。28mm ペリオ用は大白歯部の根分岐部のポリッシングに適しています。
- * （矯正）ブラケット除去後の粘着残留物の除去
- * ポイント型バー：下顎隣接面エリアに有効です。

【使用方法】

- 1) 本品を減速歯科用コントラングルハンドピースに装着する。
- 2) 本品が確実に固定されている事を確認し試運転する。
- 3) 確実に装着されている事を確認し、振れ等がなければ、本品を研削する部分に軽く押し当て、注水下で研削する。

* 限度を超えて使用したり、圧力をかけ過ぎて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。

【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
2. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し、乾燥させてから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因になる事がある。
3. 取扱上の注意
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。
4. 許容回転数を超えて使用したり、圧力をかけ過ぎて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。
許容回転数
10,000rpm～15,000rpm 以下
（注水下及びわずかな圧力で使用する事）
5. 清掃
医療用アルコールで清掃すること。
6. 滅菌
オートクレーブ滅菌（121℃以下）

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：okoDENT GmbH & CO KG (Germany)