

2016 年 10 月 19 日改訂（第 2 版 新記載要領に基づく改訂）  
2011 年 4 月 5 日作成（第 1 版）

機械器具 39 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー 16670000

届出番号:13B1X10089000643

## カウンターシンクダイヤモンドバー

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

シャンク部：ステンレススチール

作業部：ステンレススチール、ダイヤモンド粒子

#### 〔形状・構造等〕

#### 外観写真



### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：KJ MEDITECH Co., Ltd. (Korea)

#### 〔原理〕

歯科用コントラアングルハンドピースに装着し回転させる事により、歯牙・骨等の硬組織を研削する。

### 【使用目的又は効果】

歯牙・骨等の硬組織を研削。

### 【使用方法】

- 1) 使用する前に、本品が滅菌済みであることを確認する。  
(オートクレーブ滅菌可。135℃以下)
- 2) 本品を歯科用コントラアングルハンドピースに装着し口腔外で試運転を行う。
- 3) 回転に振れ等がなければ、バー先端を作業部にあて、方向に注意しながら使用する。

### 【使用上の注意】

1. 保護眼鏡を使用時に着用する事。
2. ステンレススチールの使用  
ステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）する事がある。
3. 機能水の使用禁止  
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
4. 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌可。(135℃以下)

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。  
これらがある場合は、使用を中止すること。