

2017 年 3 月 19 日改訂（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000678

2015 年 6 月 19 日改訂（第 2 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料

2011 年 7 月 20 日作成（第 1 版）

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

ユニセラグレース

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体：シリコンラバー及びステンレススチール

〔形状・構造等〕

種類：G292-SG, G303-SG, G372-SG

B292-SG, B303-SG, B372-SG

Y292-SG, Y303-SG, Y372-SG

外観写真



〔原理〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

金属及びレジンなどの研削に使用する。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
 - 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。
- * 使用回転数は明記してある速度を厳守すること。
 - * 限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。

使用回転数：

G292-SG, G303-SG, G372-SG－16,000rpm 以下

B292-SG, B303-SG, B372-SG－12,000rpm 以下

Y292-SG, Y303-SG, Y372-SG－6,000rpm 以下

【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
吸塵器を併用する事。
2. 軸部ステンレススチールは鉄に比較して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）する事がある。
3. 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
5. 使用回転数の限度を超えない事。
6. 取扱上の注意
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

〔保守・点検に係る事項〕

使用前・使用後は破損、ヒビ等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：NTI-Kahla GmbH (Germany)