

2016 年 12 月 6 日改訂（第 2 版 新記載要領に基づく改訂）

2012 年 1 月 5 日作成（第 1 版）

届出番号：13B1X10089000734

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

再使用禁止


不織布ガーゼ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿 100%不織布（4 層、5 c m×5 c m）

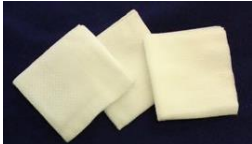

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材。

【使用方法等】

適宜滅菌して使用する。

オートクレーブ滅菌可（121℃以下）

【使用上の注意事項】

- ・ 包装に開封、破損、汚損等が見られる場合は使用しないこと。
- ・ 滅菌する場合は、製品の包装から出して滅菌パック等に入れ高圧蒸気滅菌をすること。
- ・ 滅菌のセット又は包装は関連器材の仕様を熟知して行うこと。
- ・ 体内に留置しないこと。
- ・ 開封後は速やかに使用すること。
- ・ 使用後は感染防止に留意し各地方自治体の法に則り廃棄処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Winner Medical (Chongyang) Co., Ltd. (China)