

2016 年 9 月 10 日改訂（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000767

2015 年 10 月 5 日改訂（第 2 版） 機械器具 49 医療用穿孔器、穿削器及び穿孔器

2012 年 7 月 17 日作成（第 1 版） 一般医療機器 歯科用カーバイドバー 16668000

マルミ カーバイドバー

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

軸 部：ステンレススチール

作業部：タングステンカーバイド

〔形状・構造等〕

種類

FG 用：#330, #331, #1557, #1558

GM シーズ FG 用：#1931, #1957, #1958

HP 用ラウンド & フィッシャー：#699, #700, #701, #702, #703

#1/4, #1/2, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8

外観写真



〔原理〕

本品を歯科用ハンドピースに装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

金属、プラスチック、陶材、歯牙、又は同種の材料を研削するために用いる切削器具。

【使用方法】

- 1) 使用する前に、本品が滅菌済みかであることを確認する。（オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守）
 - 2) 使用するバーを選択する。
 - 3) 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
 - 4) 本品が確実に固定されている事を確認し試運転する。
 - 5) 確実に装着されている事を確認し、振れ等がなければ、本品を研削する部分に軽く押し当て研磨する。
- * 許容回転数を超えて使用したり、圧力をかけ過ぎて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。

最高許容回転数

#330, #331, #1557, #1931, #1957：300,000rpm

#1558, #1958：200,000rpm

#699, #700, #701：45,000rpm

#1/4, #1/2, #1, #2, #3, #4, #5, #6：45,000rpm

#7, #8, #702, #703：30,000rpm

【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
吸塵器を併用する事。
2. ステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）する事がある。
3. 家庭用洗剤の使用注意
家庭用洗剤は金属を腐食させる事がある。洗浄には、
歯科用防錆洗浄剤を勧める。
4. 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事がある
ので使用しない事。
5. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、
塩化ベンゼトニウム、ポビヨード、ホルマリン・
フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、
金属腐食を起こす恐れがあるので注意すること。
6. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し乾燥させ
てから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長
時間放置すると、錆び、シミ等の原因になる事がある。

7. 取扱上の注意

器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌可。

135℃以下厳守。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

〔保守・点検に係る事項〕

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Ningbo Sinyuan Bur & Tool Co., Ltd. (China)