

2017 年 3 月改訂（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000786

2015 年 5 月改訂（第 2 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料

2012 年 11 月作成（第 1 版）

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

サクラ ブラックポリッシャー ハード

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

シリコンカーバイド粒子入りゴムシリコン製

〔形状・構造等〕

種類：下記外観写真の通り



シリンダー



ナイフエッジ



ホイール

〔原理〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

ノンプレシヤスメタル、プレシヤスメタルのスムージング用

【使用方法】

- 1) 用途に応じて粗さや形、種類を選択する。
- 2) 本品をディスク用マンドレルに取付け、歯科用電気駆動装置に確実に装着する。
- 3) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
吸塵器の併用をお勧めする。
2. 限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。
3. 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。
4. 使用回転数：7,000rpm～12,000rpm の範囲内厳守

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Rodent AG (Switzerland)

販売業者：吉野石膏販売株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巢鴨 1 丁目 8 番 3 号

Tel:03-3944-6571 Fax:03-3944-6577