

2017 年 3 月 11 日改訂（第 2 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号：13B1X10089000876

2013 年 8 月 23 日作成（第 1 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

フェルトホイール

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 補綴物等の研磨に使用するフェルト製ホイール

〔形状・構造等〕

直径 25mm、厚み 6.3mm のフェルトパフ



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Keystone INDUSTRIES. (U.S.A.)

〔原理〕

歯科用電気駆動装置ハンドピースに装着し、回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

金属、セラミック及びコンポジット等の補綴物研磨、
艶出しに使用する。

【使用方法等】

- 1) 本品をマンドレルに装着する。
- 2) 本品がマンドレルに確実に固定されている事を確認し、マンドレルを歯科用ハンドピースに装着する。
- 3) 口腔外で試運転し、振れ等が無ければ、補綴物に研磨材を塗布し軽く押し当て研磨する。

【使用上の注意】

- ・本製品は歯科用電気駆動装置に取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
- ・術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用すること。
- ・回転不良・装着時のふれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は破損等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を控える事。