

2016年8月19日改訂（第3版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号：13B1X10089000904

2015年5月28日改訂（第2版）

機械器具 39 医療用鉗子

2013年12月12日作成（第1版）

一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000

## ハマハー 石こう鉗子(ストッパー付)

### 【形状・構造及び原理等】

[概要] 石膏の破壊に用いる鉗子。

本体：ステンレススチール

ハンドル部：プラスチック

[形状・構造等]

全長：190mm

外観写真



[原理]

ハンドルを開閉する事により、先端部で石膏を挟み割る。

### 【使用目的又は効果】

石膏模型を咬合器から外す際等に、本品で石膏を挟み割る。

### 【使用方法等】

ハンドルを開閉し石膏を挟み割る。

\*丸型（白）ストッパーをスライドすると閉じた状態が継続する。

### 【使用上の注意】

#### 1. ステンレススチール使用。

素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

#### 2. 家庭用洗剤の使用注意。

家庭用洗剤は、金属を腐食させることがある。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤の使用が好ましい。

#### 3. 機能水の使用禁止。

超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。

#### 4. 洗浄、消毒、滅菌上の注意

・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。

・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。

・使用後は、器具に付着した石膏を速やかに除去すること。

・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。

・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。

・洗浄後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。

水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

#### 5. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。

腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

#### 6. 保管上の注意。

「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしない事。

又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

### 【取り扱い上の注意】

・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。

・先端作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒーティングしない事。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Karl Hammacher GmbH (Germany)