

2016 年 8 月 19 日改訂（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000905

2016 年 1 月 27 日改訂（第 2 版） 歯科材料 09 歯科用研削材料

2014 年 2 月 25 日作成（第 1 版） 一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

## マルミ ダイヤモンド研磨ペースト

---

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

ジルコニア、ハイブリッドレジン、セラミック製補綴物の研磨に用いる材料。

成分：ダイヤモンド粒子、酸化アルミニウム、脂肪酸、植物性ワックス

#### 〔形状・構造等〕

固形（プラスチック容器入り）20g

外観写真



#### 〔原理〕

フェルトパフ等に塗布し、歯科用回転機器を用い補綴物と接触させることにより研磨する。

### 【使用目的又は効果】

補綴物の研磨に用いる。

### 【使用方法】

- 1) 少量の本剤をフェルトパフ等に塗布する。
- 2) 軽い圧力及び短いインターバルで研磨を繰り返す。

### 【使用上の注意】

1. 歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士有資格者以外は使用しない事。
2. 使用時は防塵用メガネ等を使用する。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

販売業者：株式会社マルミ 歯科商店

〒780-0833 高知県高知市南はりまや町 2 丁目 16 番 3 号

TEL:088-883-2201 FAX:088-883-4711

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel: 03-5827-1380 Fax: 03-5827-1381

製造業者：株式会社 ヨシオカ

〒131-0034 東京都墨田区堤通 1-7-13