

2016 年 6 月 7 日改訂（第 3 版）新記載要領に基づく改訂

届出番号：13B1X10089000911

2015 年 9 月 9 日改訂（第 2 版）

機械器具 36 医療用ピンセット

2014 年 3 月 31 日作成（第 1 版）

一般医療機器 歯科治療用ピンセット 31814000

## K.O.治療ピンセット SB

### 【形状・構造及び原理等】

〔概要〕2つの先細のバネ性先端部をもつステンレス製  
歯科手用器具。

### 〔形状・構造等〕

全長：16cm

下記外観写真の通り



### 〔原理〕

左右のハンドルを同時に動かす事により、組織等を  
把持する。

### 【使用目的又は効果】

先端部を近接させて(閉じて)、口腔内に適用する創傷被覆・  
保護材を把持する。

### 【使用方法等】

- 1) 初めて使用する前には、洗浄し製品に付着している油  
分及び汚れを除去する。油分や汚れが残っているとシ  
ミ・着色の原因になる。
- 2) 洗浄後滅菌してから使用すること
- 3) 先端部で組織等を把持する。

### 【使用上の注意】

1. ステンレススチール使用。  
素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、  
使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
2. 家庭用洗剤の使用注意。  
家庭用洗剤は、金属を腐食させることがある。洗浄には、  
歯科用防錆洗浄剤を勧める。
3. 機能水の使用禁止。  
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがある  
ので使用しないこと。
4. 洗浄、消毒、滅菌上の注意
  - ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベン  
ゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノー  
ル、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起  
こす恐れがあるので、注意する。
  - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上  
の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂  
素材に影響を及ぼすことがある。
  - ・使用後は、防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した  
血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
  - ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
  - ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この  
時、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
  - ・洗浄、消毒、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。
  - ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注  
意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色す  
ることがある。（オートクレーブ温度135℃以下）。
  - ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥さ  
せてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置  
すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。
5. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。  
腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金  
属ウール、金属ブラシを使用しないこと。
6. 保管上の注意。  
「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆び  
ている器具と一緒にしない事。又、化学製品と一緒に収  
納・保管しない事。

### 【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱い  
はしない事。
- ・先端作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒ  
ーティングしない事。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

オートクレーブ滅菌可。（135℃以下厳守）

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、  
大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は  
使用を中止する事。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

販売業者：ケーオーデンタル株式会社

〒167-8551 東京都杉並区松庵1丁目18番13号

Tel:03-3333-8141

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel: 03-5827-1380 Fax: 03-5827-1381

製造業者：Fabryka Narzedzi Medycznych CHIRMED (Poland)