

ASA プローブ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 歯周ポケットの深さを測定するステンレス製
手用器具。

〔形状・構造等〕

3 種類：下記外観写真の通り

ASA プローブ CP-11



ASA プローブ CP-12



ASA プローブ CP-15



〔原理〕

一定の力で歯周ポケットに入れることによって、検査を
行う。

【使用目的又は効果】

歯冠修復物・充填物の歯質との密着状態の検査、付着歯石
の発見等に使用するプローブ。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に、滅菌済みであることを確認する。
（オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守）
- 2) 本品を一定の力で本体先端を歯周ポケットに挿入し、
検査する。

【使用上の注意事項】

1. 使用前の清掃について

使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全
体を十分清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行
うこと。

2. ステンレススチール使用。

素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、
使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

3. 家庭用洗剤の使用注意。

家庭用洗剤は、金属を腐食させることがある。洗浄には、
歯科用防錆洗浄剤の使用が好ましい。

4. 機能水の使用禁止。

超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがある
ので使用しないこと。

5. 洗浄、消毒、滅菌上の注意

- ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベン
ゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノー
ル、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起
こす恐れがあるので注意する。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上
の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂
素材に影響を及ぼすことがある。
- ・使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やか
に除去すること。
- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この
時、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・洗浄、消毒、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。

- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注
意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色す
ることがある。（温度：135℃以下厳守）
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥さ
せてから保管すること。
水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の
原因となる事がある。

6. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。

腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や
金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

7. 保管上の注意。

「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆び
ている器具と一緒にしない事。

又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱い
はしない事。
- ・先端部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒーテ
ィングしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、
大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は
使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

販売業者：株式会社 スマートプラクティスジャパン
TEL:0120-415-418

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号
TEL: 03-5827-1380 FAX: 03-5827-1381

製造業者：ASA Dental S.P.A (Italy)