

2016 年 5 月 31 日改訂（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）

2015 年 5 月 26 日改訂（第 2 版） 機械器具 49 医療用穿孔器、穿削器、穿孔器

2014 年 6 月 15 日作成（第 1 版） 一般医療機器 歯科用カーバイドバー 16668000

届出番号：13B1X10089000928

ラボ カーバイドカッター

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

軸 部：ステンレススチール

作業部：炭化タングステン

防塵ディスク：プラスチック

〔形状・構造等〕

種類：

ブレンカット・コース：C72G-060, C78G-060, C79G-045, C79G-060
38G-010, C251G-060, C416G-060（用途：アクリル、石膏用）

クロスカット・コース：CX72G-060, CX254G-060, CX251G-060,
CX79G-050, CX416G-060, CX79G-045, CX79G-040,
CX487G-023, CX23G-023, CX139G-023, CX78G-023,
CX71G-040,（用途：フ レキシメタル、ノンフ レキシメタル、アクリル、石膏）

クロスカット・ファイン：CX72F-060, CX78F-060, CX251F-060,
CX79F-060, CX79F-045, CX487F-023, CX23F-023

（用途：硬質レジン、フ レキシメタル、ノンフ レキシメタル）

ブレンカット・スーパーコース：C72SG-060, C251SG-060, C79SG-045
（用途：アクリル、石膏）

クロスカット・スーパーコース：CX75SG-060, CX72SG-060, CX251SG-060
CX79SG-060,（用途：アクリル、石膏）

クロスカット・エクストラコース：CX72EG-060, CX75EG-070, CX251EG-060
（用途：アクリル、石膏）

スパ イラルストレートブレンカット：KX251UF-060, KX79UF-040
（用途：軟性レジン、アクリル）

スパ イラルブレンカット：SX251UF-060, SX79UF-040
（用途：硬質レジン、フ レキシメタル）

スパ イラルブレンカット・コース：SX417G-060（用途：アクリル）

スパ イラルブレンカット・ファイン： 745203 J



〔原理〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

金属、レジン、陶材、石膏等を研削するために用いる
切削器具。

【使用方法】

- 1）使用するバーを選択する。
- 2）本品を歯科用電気駆動装置に装着する。
- 3）本品が確実に固定されている事を確認し試運転する。
- 4）シャンク上の防塵ディスクをハンドピースチャック
上まで下げて使用する。
- 5）確実に装着されている事を確認し、振れ等がなければ、
本品を研削する部分に軽く押し当て研削する。

【使用上の注意】

1. 使用回転数を厳守すること
（3 0, 0 0 0 rpm 以下厳守）
2. 無理な角度や過度の加圧で使用しない事。
特に頭部の細いもの、長いもの、大きな形状の
物は、変形や破折の危険があるので注意する。
3. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
吸塵器を併用する事。
4. ステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、
使用方法、環境によっては腐食（錆び）する事がある。
5. 機能水及び過酸化水素の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事がある
ので使用しない事。また過酸化水素との接触は錆やダメ
ージの原因になるので避けること。

6. 超音波洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し乾
燥させてから保管する事。水分が付着したまま長時間放
置すると、錆び、シミ等の原因になる事がある。

7. 消毒剤・洗浄剤を使用する際は、防錆剤が入った製品を
使用する事。

次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、
塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン
フェノール、グ ルコン酸クロルヘキシジン等は、
金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。

8. 取扱上の注意
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしな
い事。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌可。

1 3 5℃以下厳守。

*防塵ディスクを外してから滅菌を行うこと（防塵ディス
ク：オートクレーブ不可）。

*滅菌温度によりシャンク上のカラー線が消える場合があ
る。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大き
な腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

TEL：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381

製造業者：DFS- DIAMON GmbH （Germany）