

2016 年 7 月 5 日改訂（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X10089000956

2016 年 4 月 28 日改訂（第 2 版） 歯科材料 09 歯科用研削材料

2014 年 10 月 10 日作成（第 1 版） 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

## スーペリアダークグレーラバーホイール

### 【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 円形の回転式研磨器具である。  
組成は、シリコンゴム及び炭化ケイ素。

#### 〔形状・構造等〕

φ 22, 2 × 3, 1 mm

外観写真



使用回転数：10,000rpm 以下厳守

#### 〔原理〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

### 【使用目的又は効果】

金属の研磨、艶出しに用いる。

### 【使用方法】

- 1) 本品をディスク用マンドレルに装着し、歯科用電気駆動装置にマンドレルを奥まで確実に挿入する。
  - 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。
- \* 使用回転数は明記してある速度を厳守すること。
  - \* 限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意すること。

### 【使用上の注意】

- 1) 本製品は歯科用電気駆動装置のハンドピースに装着し、定められた回転範囲内で使用する事。
- 2) 本製品使用による目の損傷を防ぐ為、術者及び患者は保護眼鏡を必ず着用する事。
- 3) 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用を中止する事。
- 4) 本品を使用する際、折れたり曲がったりする恐れがあるので、無理な角度や過度な加圧での使用は避ける事。
- 5) 本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしない事。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【保守・点検に係る事項】

#### 使用前・使用後の点検

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

### 【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Keystone INDUSTRIES. (U.S.A.)