

2016年4月26日改訂（第2版 新記載要領に基づく改訂）  
2014年12月18日作成（第1版）

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

届出番号:13B1X10089000958

## ジルコスター

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

ジルコニア、ハイブリッドレジン、セラミック製補綴物の研磨に用いる材料。

成分：ダイヤモンド粒子、酸化アルミニウム、脂肪酸、植物性ワックス

#### 〔形状・構造等〕

固形（プラスチック容器入り）

外観写真



#### 〔原理〕

ロビンソンブラシ等に塗布し、歯科用回転機器を用い補綴物と接触させることにより研磨する。

### 【使用目的又は効果】

補綴物の研磨に用いる。

### 【使用方法】

- 1) 少量の本剤をロビンソンブラシ等に塗布する。
- 2) 軽い圧力及び短いインターバルで研磨を繰り返す。

### 【使用上の注意】

使用時は防塵用メガネ等を使用する。

研磨時に圧をかけ過ぎない事。

劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：株式会社ヨシオカ

〒131-0034 東京都墨田区堤通 1-7-13

製造業者：山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1