

MTペーパーコーン

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 補綴物等の研削に用いる円錐形の研削器材。

素材：耐水性ペーパー、和紙、炭化ケイ素、白色アルミナ

〔形状・構造等〕

形態5種類：ビッグ、シャトル、レギュラー、ミニ、極ミニ
（粗さ）

ビッグ、シャトル、レギュラー 3種類：

細目（緑）、中目（赤）、荒目（黄）

ミニ2種類：細目（緑）、中目（赤）

極ミニ3種類：#1000（白）、#600（青）、#320（黒）
（サイズ）

ビッグ：底面直径 9.5mm×長さ 25mm


シャトル：底面直径 6mm×長さ 17.5mm

レギュラー：底面直径 8.5mm×長さ 25mm

ミニ：底面直径 6.3mm×長さ 17mm

極ミニ：底面直径 4mm×長さ 15mm

外観写真

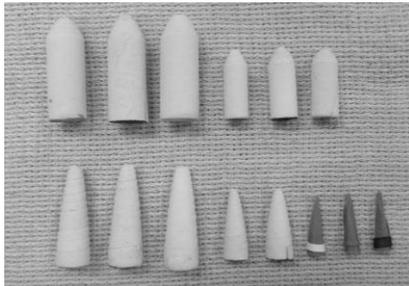

〔原理〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させることで研削できる。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削。

【使用方法】

- 1) 用途に応じて粗さや形、種類を選択する。
- 2) 本品を専用マンドレルに取付け、歯科用電気駆動装置に確実に装着する。
- 3) 試運転して回転に振れ等がなければ、補綴物等を研削する。

【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
吸塵器の併用をお勧めする。
2. 取扱上の注意
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。
使用回転数は明記してある速度を厳守する事。
使用回転数：6,000rpm 以下厳守
限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：株式会社ヨシオカ（東京都）