


## ペーパーコーンマンドレル

### 【形状・構造及び原理等】

〔概要〕研削・研磨に用いるMTペーパーコーン（別売品）を保持する専用シャフト。真鍮製。

〔形状・構造等〕

種類：マンドレル 大（ビッグ用）  
マンドレル 小（シャトル、ミニ用）  
割マンドレル（レギュラー、極ミニ用）

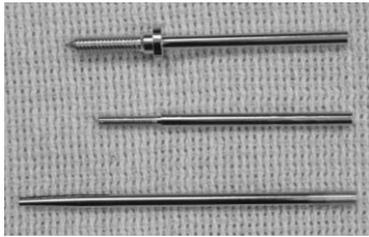

〔原理〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着し回転させて使用する。

【使用目的】

研削、研磨に用いるペーパーコーンを保持する。

【使用方法】

- 1) MTペーパーコーンを装着する。
  - 2) 緩みのない事を確認し、本品を歯科用電気駆動装置に装着し試運転する。
  - 3) 振れ等がなければ、研削研磨を開始する。
- \*使用回転範囲を越えたり、圧力をかけ過ぎて使用すると破損や折れの原因になるので注意する。  
使用回転数：10,000rpm以下厳守。
- \*装着したペーパーコーンの回転範囲が10,000rpm以下の場合、ペーパーコーンの使用回転数を厳守すること。

【使用上の注意】

1. 家庭用洗剤の使用注意  
家庭用洗剤は金属を腐食させる事があるので注意する。
2. 機能水の使用禁止  
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
3. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。
4. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し、乾燥させてから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因になる事がある。
5. 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：株式会社ヨシオカ（東京都）