

2017 年 3 月 5 日改訂（第 2 版）

届出番号:13B1X10089001003

2016 年 1 月 5 日作成（第 1 版 新記載要領に基づく作成）

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 歯科用口腔内カメラ 70179000

マルチ シンクビジョン

再使用禁止（ディスプレイ・プロブカバー・イヤープローブカバー・バイトクッション）

【禁忌・禁止】


再使用禁止（ディスプレイ・プロブカバー、イヤープローブカバー、バイトクッション）

【形状・構造及び原理等】


【概要】 口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する装置。

【形状・構造等】

本体図及び外観写真（フレキシブルプロブ装着）

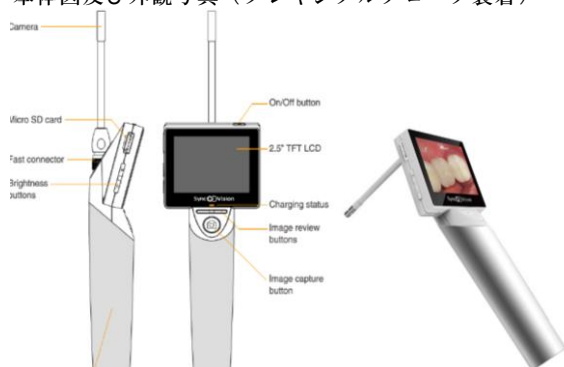

セット内容：

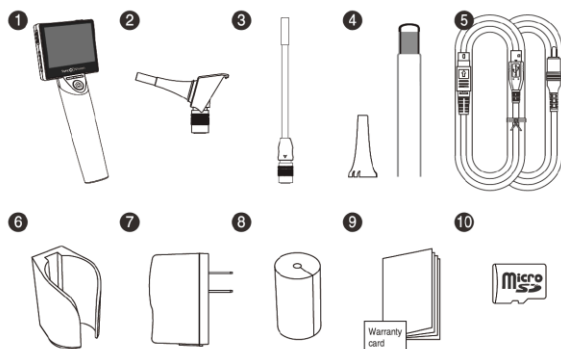

①本体 ②イヤープローブ ③フレキシブルプロブ ④ディスプレイ・プロブカバー、ディスプレイ・プロブカバー ⑤USB ケーブル、RCA ケーブル
⑥ホルダー ⑦AC アダプター ⑧ディスプレイ・プロブバイトクッション
⑨使用説明書、保証書 ⑩マイクロ SD カード

【原理】

本品はカメラで撮影した画像をモニターに映し、またメディア（マイクロ SD カード）に保存した画像をコンピューター等の画面上に表示する。

【使用目的】

口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する。

【使用方法等】

1) バッテリーの充電

USB ケーブルと AC アダプターを接続する。コネクタを本体に接続し充電する。（充電時間：約 1.5 時間）
充電中は、モニター下部のハロッドランプが黄色に点灯、充電終了時にグリーンに変わる。

2) フレキシブルプロブを本体に接続する。

3) 電源

モニター上部にある電源ボタンを 3 秒以上長押しするとオフ→オンまたはオン→オフに切り替えられる。

4) 撮影したい箇所にカメラを向け焦点を合わせる。

焦点範囲：15mm～50mm

5) 撮影方法 1

撮影ボタンを押す（1 秒未満）。

撮影方法 2

撮影ボタンを長押しした状態で、撮影ボタンから指を放す。

6) 保存した画像の確認

左右の撮影ボタンを押し、画像を確認する。

【使用上の注意】

1. 本品は精密機械であるので取扱いには注意すること。
2. 本品を改造・分解しないこと。
3. 付属のディスプレイ保護カバーは使用ごとに交換すること。
4. 水がかからないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管
湿度が高い場所に保管しないこと
化学薬品と一緒に保管しないこと

【保守・点検に係る事項】

清掃時は電源を切ること。
本体の清掃は柔らかい布を用いる
水または中性洗剤を使用する場合はよく絞ってから拭くこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9
Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381
製造業者：SyncVision Technology Corp. (Taiwan)

取扱い説明書を必ずご参照下さい