


## ミラーメイトガラス 口腔内撮影用ミラー

### 【形状・構造及び原理等】

〔概要〕口腔内診査時に用いる、クロームコーティングガラス製鏡。


〔形状・構造等〕5種類

咬合面用 3AXL      咬合面用 3A      咬合面用 3C

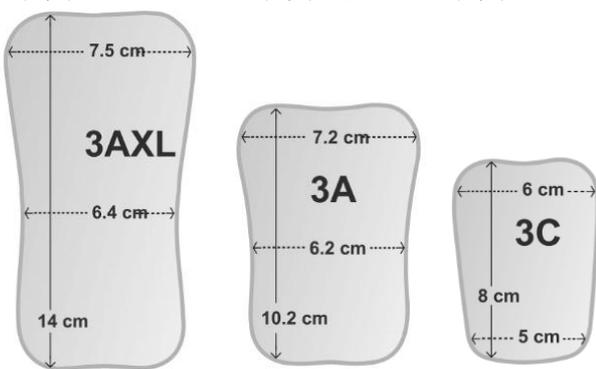

頬側用 1

舌側用 2

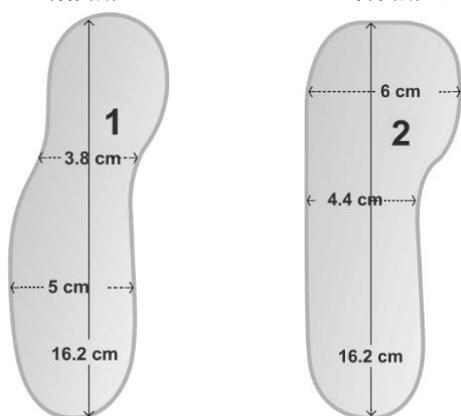

### 〔原理〕

ミラー部分に口腔内及び歯牙を反射させる事で観察・診査できる。

### 【使用目的又は効果】

口腔内撮影時に使用する。

### 【使用方法等】

- 1) 使用する前に滅菌済みであることを確認する。  
(オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守。)
- 2) 撮影したい部位により適切な鏡を選択する。
- 3) 選択した鏡で口腔内の歯牙等を鏡の部分に反射させて撮影する。

### 【使用上の注意】

1. ガラス使用。  
素材のガラスは、過度の圧力をかけたり、落としたりすると破折することがある。
2. 洗浄、消毒、滅菌上の注意
  - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
  - ・使用後は、洗浄し器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。

- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。（オートクレーブ温度135°以下）。
  - ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。  
水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。
  - ・超音波洗浄は、コーティング材を剥がす恐れがあるので避ける事。
  - ・超酸化水（超酸性水）次亜塩素酸等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
3. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。  
ミラー面が傷つく恐れがあるので、使用及び洗浄前後にブラシ等でミラー表面を磨かない事。使用前にミラー面が曇っている場合は、柔らかい布等で拭く事。
  4. 保管上の注意。  
本品の保管は、科学薬品等と一緒に保管しない事。また、破損及び破折の恐れがあるので、周囲に重量のある器具等と一緒に保管しない事。

### 【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、キズ等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック  
〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号  
Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381  
製造業者：Young Sun Develop Co. (Taiwan)