

2016 年 8 月 30 日改訂（第 2 版 新記載要領に基づく改訂）
2016 年 5 月 27 日作成（第 1 版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

届出番号:13B1X10089001017

CLINDENT ジルコニアカッターHP

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 補綴物の研削等に用いる器材。

シャンク：ステンレススチール製

ヘッド：セラミック製

〔形状・構造等〕

種類：全 15 種類

バレットホワイト（6 種類）

エクストラコース、コース、ミディアム、ファイン、エクストラファイン、エクストラスーパーファイン

バレットブラック（4 種類）

エクストラコース、コース、ミディアム、ファイン

コンカルホワイト（5 種類）

コース、ミディアム、ファイン、エクストラファイン、エクストラスーパーファイン



〔原理〕

本品を歯科用ハンドピースに装着し、回転させる事により補綴物が研削できる。

【使用目的又は効果】

ハイブリッドレジン、コンポジットレジン

アクリックレジン、軟性裏層材、石膏等の研削。

【使用方法】

- 1) 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
- 2) 本品が確実に固定されている事を確認し試運転する。
- 3) 確実に装着されている事を確認し、振れ等がなければ、本品を研削する部分に軽く押し当てて研削する。

* 限度を超えて使用したり、圧力をかけ過ぎて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意する。

【使用上の注意】

1. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
2. 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を十分除去し、乾燥させてから本品と一緒に保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因になる事がある。
3. 取扱上の注意
器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事。
4. 許容回転数を超えた使用、圧力をかけ過ぎた使用は、破損や怪我の原因となるので注意する。
許容回転数
20,000 rpm 以下
5. 滅菌
オートクレーブ滅菌（135℃以下）

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷等がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

販売業者：ケーオーデンタル株式会社

〒167-8551 東京都杉並区松庵 1 丁目 18 番 13 号

Tel:03-3333-8141

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel:03-5827-1380 Fax:03-5827-1381

製造業者：Jiangyn Ordg Trading Co.,Ltd (China)