

PD プロフィーカップ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いる器具。本品は歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を歯に適用する。
カップ部：生体適合性を持つ熱可塑性エラストマー（ラテックス成分非配合）

シャンク部：グラスファイバー補強済熱可塑性物質

〔形状・構造等〕

種類：スノー〔白〕ソフト
ファイヤー〔赤〕ミディアム

形状：下記外観写真の通り



【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前、破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Produits Dentaires SA (Switzerland)

〔原理〕

歯科用ハンドピースに取り付け回転させて研磨剤を歯に適用する事で歯面の清掃が行える。

【使用目的又は効果】

歯面清掃及び歯面研磨。

スノー〔白〕ソフト：かるい着色やプラークの除去及び清掃用。

ファイヤー〔赤〕ミディアム：ひどい着色やプラークの除去及び清掃用。

【使用方法等】

- 1) 歯科用コントラハンドピースに装着する。
- 2) 試運転し確実に装着されている事を確認する。
- 3) 研磨ペーストをカップに適量塗布し、歯面研磨を行う。特殊形状のカップ先端が歯面に密着しながら研磨する。*1,500rpm 以下厳守。

【使用上の注意】

- ・本製品は歯科用電気駆動装置に取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
- ・研磨中カップに圧力をかけ過ぎない事。
- ・摩擦加熱を防ぐ為、歯の痛みを防ぐために研磨ペーストを十分に塗布してから使用する事。
- ・術者及び患者は保護眼鏡、マスク、グローブを必ず着用すること。
- ・回転不良・装着時のふれや装着がゆるい場合は、使用しないこと。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌不可

消毒が必要な時は、薬液を用いる事。

薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、本製品素材に影響を及ぼすことがある。