

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 35768000

Zibone NiTi ブラシ


【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 歯科用インプラント表面の清掃に用いる事を目的とした回転式歯科用器具。

〔形状・構造等〕

ナノ：ナロータイプ
ノンフラップでの使用や狭部用
ポケット：ワイドタイプ
フラップオープン時/前歯部用

外観写真

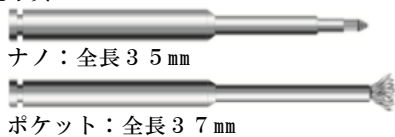

〔原理〕

歯科用ハンドピースに取り付け回転させて、歯科用インプラント表面に適用する事で清掃が行える。

【使用目的又は効果】

本品は、ペリインプランタイトィスの原因となり得るプラークや歯石等の外部要因により汚染されたチタンインプラント表面の清掃及び機械的デブライドメント用のニッケルチタン製ブラシである。歯科医及び歯科衛生士が用いる事を目的とした回転式歯科用器具である。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に、本品が滅菌済みである事を確認する。（オートクレーブ滅菌可。134℃以下・15 分以内厳守）
- 2) 歯科用コントラングルハンドピースに装着する。
- 3) 試運転し確実に装着されている事を確認する。
- 4) 注水下で、先端のニッケルチタン製ブラシをインプラント表面（スクリュー部）に軽く当てたり離したりを繰り返しながら清掃する。*推奨回転数：600～1,200rpm の範囲内。

【使用上の注意事項】

- ・本製品は歯科用電気駆動装置に取り付け、上記使用回転数を厳守すること。
- ・同一患者に繰り返し使用する場合、初回清掃後に本品を 3%過酸化水素水に浸し生理食塩水でリンスしてから次のインプラントを清掃する事を勧める。
- ・過度の圧力をかけて使用しない事。
- ・摩擦加熱を防ぐ為、歯の痛みを防ぐために十分に注水しながら使用する事。
- ・子供やインプラント外科を意図しない患者には使用しない事。
- ・ニッケル及びチタニウムへ過敏症状のある患者には使用しない事。
- ・術者及び患者は保護眼鏡、マスク、グローブを必ず着用すること。
- ・回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用しないこと。
- ・素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼす事がある。

- ・使用後は、洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を表面に傷が付かないように速やかに除去すること。
- ・洗浄・消毒・滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。
- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質又は変色することがある。
- ・洗浄・消毒・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となる事がある。
- ・傷つく恐れがあるので、使用及び洗浄前後ブラシ等で磨かないこと。
- ・本品の保管は、化学薬品等と一緒に保管しない事。また、破損及び破折の恐れがあるので、周囲に重量のある器具等と一緒に保管しない事。特に塩素系及びヨウ素系消毒剤は腐食の原因になるので、使用中に付着した際は出来るだけ早めに洗浄すること。

【取り扱い上の注意】

- ・オートクレーブ可 (134℃以下厳守)
- ・消毒が必要な場合は薬液を用い、その使用方法に従う。
- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管
高温多湿、直射日光を避けて保管する事。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号
Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381
製造業者：COHO BIOMEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (Taiwan)