

ライトミラー

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具。
ハンドルにライトが付いて、鏡部を照らす事が出来る。

ハンドル部：真鍮製

作業部柄：ステンレススチール製、鏡：ガラス製

〔形状・構造等〕

ハンドル部長さ：150 mm



〔原理〕

ハンドル部に歯鏡を装着して口腔内を観察する。

【使用目的又は効果】

口腔内の状態を検査・観察する為に使用する。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に、作業部（歯鏡）を滅菌する。
（オートクレーブ滅菌可。132℃以下・20 分以内厳守）
ハンドル部は、水洗い・オートクレーブ滅菌できない為、薬液を含ませた、ガーゼ、ワッテ等で清掃・消毒する。
- 2) ハンドルに歯鏡を装着する。
- 3) 口腔内を観察・検査する。
- 4) ライトを点灯させるには、ハンドル後部にある赤いボタンを押す。

【使用上の注意】

- 1 歯科用ガラス使用。
素材のガラスは、過度の圧力をかけたり、落としたりすると破折する事がある。
- 2 洗浄、消毒、滅菌上の注意
・ハンドル部は、水洗い・オートクレーブ滅菌不可。
・薬液を含ませた、ガーゼ等で清掃ふる。
- 3 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。
ミラー面が傷つく恐れがあるので、使用及び洗浄前後ブラシ等でミラー表面を磨かないこと。使用前にミラー面が曇っている場合は、柔らかい布等で拭く事。
- 4 保管上の注意。
本品の保管は、化学薬品等と一緒に保管しない事。
また、破損及び破折の恐れがあるので、周囲に重量のある器具等と一緒に保管しない事。特に塩素系及びヨウ素系消毒剤は腐食の原因になるので、使用中に付着した際は出来るだけ早めに洗浄すること。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。
- ・作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒートリングしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。