

シリコンポイント R

【形状・構造及び原理等】

[概要] シリコンゴム基材で結合された、炭化ケイ素、ダイヤモンド粒子等の研磨成分から成る歯科用研磨材。
作業部材質：シリコンゴム、炭化ケイ素、ダイヤモンド粒子
シャンク部材質：ステンレススチール。

【形状・構造等】

種類：コントラ用（CA用）：

シリコンカップ M2 CA，
13 S M2 CA，13 M2 CA
28 M2 CA，28 M3 CA

ストレートハンドピース用（HP用）：

シリコンカップ M2 HP
13 S M2 HP，13 M2 HP
28 M2 HP，10 M2 HP
13 S M3 HP，13 M3 HP
28 M3 HP

【原理】

本品を歯科用電気駆動装置に装着して回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

歯科用充填材料、補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法】

- 1) 歯科用電気駆動装置にシャンクを確実に挿入する。
- 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

【使用上の注意】

1. 許容回転数を厳守する事。
限度を超えて使用した場合、破損や怪我の原因となるので注意すること。
【許容回転数は各形態により異なり、パッケージに表示してある。】
2. 使用中は保護マスク及び保護眼鏡を着用する事。
また、吸塵器を併用する事。
3. 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させる事があるので使用しない事。
4. 口腔内使用の際は、オートクレーブにより滅菌する。
（121℃／20分以内 乾燥工程は避ける）

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：

Toboom Shanghai Precise Abrasive Tool Co., Ltd (China)

販売業者

ケーオーデンタル株式会社

〒167-8551 東京都杉並区松庵 1-18-13