

クレーブラバーダムフレーム

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 術野に到達しやすくするためにラバーダムを延伸した状態で保持するナイロン製フレーム。

〔形状・構造等〕

種類：DF01、DF02

色：ブルー・ホワイト

下記外観写真の通り

DF01



DF02



〔原理〕

延伸したラバーダムシートをフレームの突起で固定する。

【使用目的又は効果】

ラバーダムシートを延伸した状態で保持する為に使用する。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みである事を確認する。
(オートクレーブ滅菌 134℃以下厳守)
- 2) フレームの突起部分にラバーダムシートを伸張させながら引掛け、フレーム内にダムを形成する。

【使用上の注意】

1. フレームの突起部分は鋭利になっているので
術者並びに患者がケガをしないよう注意する事。
2. 消毒・滅菌時の注意。
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- ・オートクレーブ滅菌の温度に注意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。
(温度：134℃以下厳守)
3. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。
傷の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Andent Dental Co., Ltd (chaina)