

ツーウェイフォトミラー

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 口腔内診査時に用いる、クロームコーティング
ガラス製鏡。

〔形状・構造等〕 3 種類： L、M、S



〔原理〕

ミラー部分に口腔内及び歯牙を反射させる事で観察・診査
できる。

【使用目的又は効果】

口腔内撮影時に使用する。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に滅菌済みである事を確認する。
(オートクレーブ滅菌可。137℃以下厳守。)
- 2) 撮影したい部位により適切な鏡を選択する。
- 3) 選択した鏡で口腔内の歯牙等を鏡の部分に反射させ
て撮影する。

【使用上の注意】

1. ガラス使用。
素材のガラスは、過度の圧力をかけたり、落としたりする
と破折することがある。
2. 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ・ 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上
の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹
脂素材に影響を及ぼすことがある。
 - ・ 使用後は、洗浄し器具に付着した血液、体液、組織片を
速やかに除去すること。
 - ・ 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注
意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色す
ることがある。（オートクレーブ温度 137℃以下）。
 - ・ 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥さ
せてから保管すること。
水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等
の原因となる事がある。
 - ・ 超音波洗浄は、コーティング材を剥がす恐れが有るの
で避ける事。
 - ・ 超酸化水（超酸性水）次亜塩素酸等は、金属を腐食
させることがあるので使用しないこと。
3. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。
ミラー面が傷つく恐れがあるので、使用及び洗浄前後に
ブラシ等でミラー表面を磨かない事。使用前にミラー面
が曇っている場合は、柔らかい布等で拭く事。
4. 保管上の注意。
本品の保管は、科学薬品等と一緒に保管しない事。また、
破損及び破折の恐れがあるので、周囲に重量のある器具
等と一緒に保管しない事。

【取り扱い上の注意】

- ・ 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱い
はしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、キズ等がないか確認す
る事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Young Sun Develop Co. (Taiwan)