

ダブルアクションサイドニッパー

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

歯科技工用の器具で、ワイヤー等の切断に用いるものをいう。

ハンドル部：ビニルコーティング、スチール製

作業部：カーボンスチール製

〔形状・構造等〕

全長：17cm

外観写真



〔原理〕

作業部でワイヤー等を挟み切断する。

【使用目的又は効果】

ワイヤー等の切断に用いる。

【使用方法等】

ワイヤー等を先端部に挟み、ハンドルを握り切断する。

【使用上の注意】

1. カーボンスチール使用。
素材のカーボンスチールは、錆び難い金属であるので、水分が付着しない様注意する事。
2. 機能水の使用禁止。
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
3. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。
腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。
4. 保管上の注意。
「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしない事。
又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌不可

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。
- ・先端作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒートテイングしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Karl Hammacher GmbH (Germany)