

ワイヤーカッターTC

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

歯科技工用の器具で、ワイヤ等の切断に用いるものをいう。

本 体：ステンレススチール、

作業部：タングステンカーバイド

ハンドル部：ビニルコーティング

〔形状・構造等〕 外観写真の通り



〔原理〕

作業部でワイヤー等を挟み切断する。

【使用目的又は効果】

ワイヤー等の切断に用いる。

【使用方法等】

ワイヤー等を先端部に挟み、ハンドルを握り切断する。

【使用上の注意】

1. ステンレススチール使用。

素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

2. 家庭用洗剤の使用注意。

家庭用洗剤は、金属を腐食させることがある。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤の使用が好ましい。

3. 機能水の使用禁止。

超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。

4. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。

腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

5. 保管上の注意。

「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしない事。

又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌不可

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはない事。
- ・先端作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒートテイングしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Rite-Dent Manufacturing Company (Pskistan)