

再使用禁止

ルミンデックス3用ディスポミラー

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具。

材質：PMMA（ポリメタクリル酸メチル樹脂）

〔形状・構造等〕

鏡部直径：22mm

外観写真



〔原理〕

別売りのルミンデックス3に接続し口腔内を観察する。

ルミンデックス3に装着した状態



【使用目的又は効果】

口腔内の状態を検査・観察する為に使用する。

【使用方法等】

- 1) 本品を包装用ビニール袋から出し、
ルミンデックス3に装着する。
- 2) 口腔内を観察・検査する。

【使用上の注意】

素材のPMMAは、過度の圧力をかけたり、落としたり
すると破折する事がある。
また、熱による変形に注意する。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱い
はしない事。
- ・作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒート
ィングしない事。

***オートクレーブ滅菌不可**

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、
大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は
使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Dentmate Technology Co., Ltd. (Taiwan)