

2026年5月改訂（第2版）

2023年9月作成（第1版 新記載要領に基づく作成）

機械器具 30 結紮器及び縫合器

一般医療機器 持針器 12726010

## マイクロニードルホルダーブラック

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

本体：ステンレススチール

窒化チタンアルミコーティング（ブラック）

#### 〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り

種類：マイクロニードルホルダーブラック 直 全長：17.5cm



マイクロニードルホルダーブラック 曲 全長：17.5cm



マイクロニードルホルダーKタイプブラック 直 全長：17.5cm



### 【使用目的又は効果】

縫合・結紮の際に縫合針を把持するために用いる。

### 【使用方法等】

【保守・点検に係る事項】に従い、使用すること。

### 【使用上の注意】

1. 滅菌前は洗浄・注油・滅菌を行うこと。
2. 薬液等が付着した場合、腐食するおそれがあるため、速やかに清拭すること。
3. 家庭用洗剤は、金属を腐食させるおそれがあるため、洗浄には、医療用防錆洗浄剤の使用が好ましい。
4. 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させるおそれがあるため、使用しないこと。
5. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こすおそれがあるため使用しないこと。
6. 薬液消毒を行う際は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼすことがある。
7. 使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
8. 洗剤の残留がないように十分にすすぎを行うこと。
9. 洗浄、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。
10. オートクレーブ滅菌器等の乾燥温度に注意すること。

11. 水分が付着した状態で長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

12. 磨き粉や金属ウール、金属ブラシは使用しないこと。

### 【取り扱い上の注意】

1. 器具の寿命を著しく低下させるため、粗雑な取り扱いをしないこと。
2. 破折の原因となるため、器具をヒートリングしないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 塵やほこり等が付かない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐ為、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
3. 化学製品と一緒に保管しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔使用前後の点検〕

1. 使用前後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、腐食等がないか確認すること。
2. 関節部の動きに異常がないか確認すること。
3. 先端部にすり減り等がないか確認すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

TEL：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381

製造業者：Rite-Dent Manufacturing Company (Pakistan)