

2026年5月改訂（第2版）

2023年9月作成（第1版 新記載要領に基づく作成）

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット 35079001

マイクロフォーセップスブラック

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体：ステンレススチール
窒化チタンアルミコーティング（ブラック）

〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り

種類：マイクロフォーセップスブラック キザ付 全長：17.5cm



マイクロフォーセップスブラック キザ無 全長：17.5cm



マイクロフォーセップスブラック リング：全長 17.5cm



【使用目的又は効果】

先端の把持部を閉じることにより、皮膚、組織、異物等をつまみ、保持するために用いる。

【使用方法】

【保守・点検に係る事項】に従い、使用すること。

【使用上の注意】

- 滅菌前は洗浄・滅菌を行うこと。
- 薬液等が付着した場合、腐食するおそれがあるため、速やかに清拭すること。
- 家庭用洗剤は、金属を腐食させるおそれがあるため、洗浄には、医療用防錆洗浄剤の使用が好ましい。
- 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させるおそれがあるため、使用しないこと。
- 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こすおそれがあるため使用しないこと。
- 薬液消毒を行う際は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼすことがある。
- 使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- 洗剤の残留がないように十分にすすぎを行うこと。
- 洗浄、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。
- オートクレーブ滅菌器等の乾燥温度に注意すること。
- 水分が付着した状態で長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- 磨き粉や金属ウール、金属ブラシは使用しないこと。

【取り扱い上の注意】

- 器具の寿命を著しく低下させるため、粗雑な取り扱いをしないこと。
- 破折の原因となるため、器具をヒートンクしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 塵やほこり等が付かない清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐ為、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- 化学製品と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前後の点検〕

- 使用前後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、腐食等がないか確認すること。
- 先端部にすり減り等がないか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック
〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号
TEL：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381
製造業者：Rite-Dent Manufacturing Company (Pakistan)