

2025 年 7 月作成（第 1 版）

機械器具 25 医療用鏡のうち、歯鏡及び歯鏡柄
一般医療機器 歯鏡 31776000

マイクロミラーブラック ウルトラシン

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体：アルミニウム合金

ミラー：ウルトラクリアガラス

〔形状・構造等〕

種類：ミラー4種類（2×7mm、3mm、3×9mm、5mm）

外観写真



2×7mm



3mm



3×9mm



5mm

〔原理〕

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【使用目的又は効果】

口腔内の状態を検査・観察する為に使用する。

【使用方法等】

- 1) 【保守・点検に係る事項】に記載する本品の点検後、洗浄・滅菌を行い、使用すること。
（オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守）
- 2) 口腔内を観察・検査する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前の清掃について
使用前に必ず洗浄・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。
- 2) 洗浄について
家庭用洗剤は、金属を腐食させることがある為、歯科用防錆洗浄剤の使用が好ましい。
- 3) 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
- 4) 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
 - ・使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
 - ・洗浄、消毒、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。

- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

5) 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止

腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

6) 保管上の注意

「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしない事。
又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。
- ・作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒーティングしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Foshan Ruibang Xincheng Medical Instrument Co., Ltd. (China)