

2026年5月改訂(第2版)
2025年7月作成(第1版)

機械器具 25 医療用鏡のうち、歯鏡及び歯鏡柄
一般医療機器 歯鏡 31776000

マイクロミラーブラック ウルトラシン

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体：アルミニウム合金
ミラー：ウルトラクリアガラス

〔形状・構造等〕

種類：ミラー4種類(2×7mm、3mm、3×9mm、5mm)
外観写真



2×7mm



3mm



3×9mm



5mm

〔原理〕

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【使用目的又は効果】

口腔内の状態を検査・観察する為に使用する。

【使用方法等】

- 【保守・点検に係る事項】に記載する本品の点検後、洗浄・滅菌を行い、使用すること。
- 口腔内を観察・検査する。

【使用上の注意】

- 滅菌前は洗浄・滅菌を行うこと。
- 薬液等が付着した場合、腐食するおそれがあるため、速やかに清拭すること。
- 家庭用洗剤は、金属を腐食させるおそれがあるため、洗浄には、医療用防錆洗浄剤の使用が好ましい。
- 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させるおそれがあるため、使用しないこと。
- 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こすおそれがあるため使用しないこと。
- 薬液消毒を行う際は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼすことがある。
- 使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- 洗剤の残留がないように十分にすすぎを行うこと。
- 洗浄、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。

- オートクレーブ滅菌器等の乾燥温度に注意すること。
- 水分が付着した状態で長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- 磨き粉や金属ウール、金属ブラシは使用しないこと。

【取り扱い上の注意】

器具の寿命を著しく低下させるため、粗雑な取り扱いをしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 塵やほこり等が付かない清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐ為、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- 化学製品と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前後の点検〕

使用前後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、腐食等がないか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック
〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号
TEL：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381
製造業者：Rite-Dent Manufacturing Company (Pakistan)