

2026年5月作成（第1版 新記載要領に基づく作成）

機械器具 25 医療用鏡  
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000

## アドメテック TTLルーペ

## 【禁忌・禁止】

眼に重篤なダメージを与える可能性があるため、本機器を通して太陽・光照射器・レーザー光線・高輝度照明等を直視しないこと。

## 【形状・構造及び原理等】

## 〔概要〕

ルーペレンズ：光学レンズ

フレーム：チタンフレーム

## 〔形状・構造等〕

眼鏡レンズ部に埋め込まれた双眼ルーペ

種類：2.5倍、3.2倍

外観写真



## 〔原理〕

装着されているレンズから覗くことにより、作業視野の拡大像が得られる。

## 〔仕様〕

## 1) 倍率

倍率	作業距離	焦点深度	視野範囲	重量
2.5倍	350mm	105mm	105mm	49～51g
	400mm	130mm	120mm	
	450mm	160mm	135mm	

倍率	作業距離	焦点深度	視野範囲	重量
3.2倍	350mm	60mm	75mm	41～43g
	400mm	75mm	85mm	
	450mm	90mm	95mm	

2) フレーム種類：ブルースフレーム、ソウルフレーム  
スウィングフレーム、Jazz フレーム

## 【使用目的又は効果】

作業野の拡大像を得る為に使用する。

## 【使用方法等】

- 本品装着後、頭部に緩みがないようストラップでしっかり固定する。
- 下方角度を合わせる。
- 拡大像を観察する。  
※見えにくい場合は、ノーズパッドで調整すること。

## 【使用上の注意】

- 本品は眼鏡レンズ部に埋め込まれた双眼ルーペのため、自身で位置や角度調整はしないこと。
- 鏡筒部分は脱離や角度に影響を与える可能性があるため、直接把持しないこと。

- 掛け外しは必ず両手でツル部分を持つこと。
- 高い場所から落下させたり、ぶつけたりしないこと。
- 浸水、薬液浸漬は行わないこと。  
※清掃は付属のメガネ拭き、またはクリーニングシートをご使用ください。
- かゆみ、かぶれ、湿疹などの症状が発生した場合は、本品の使用を止め、医師の診断を受けること。
- フレーム、鼻パッド等の消耗品は経年変化により素材が劣化するため、必要に応じて交換すること。
- 経時変化や使用方法等により、ネジの緩みや脱落、フレーム破断等の故障・損傷が発生した際は、自身で修理・接着等を行わず、販売店に連絡すること。
- 本品は改造しないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

- 使用しない時は専用のケースに入れて保管すること。
- 落下するような場所へ保管しないこと。
- 直射日光や高温多湿を避けて保管すること。

## 【保守・点検に係る事項】

- 破損、ヒビ、汚染等がないか確認を行うこと。
- 各部に緩みがなく、正常に機能するか確認を行うこと。
- 光学系に曇りや汚れがないか確認すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック  
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1丁目8番9号  
TEL：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381  
製造業者：Admetec Solutions LTD. (Israel)