

2026年5月改訂（第2版）

2026年5月作成（第1版 新記載要領に基づく作成）

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000

エルゴ TTLルーペ

【禁忌・禁止】

眼に重篤なダメージを与える可能性があるため、本機器を通して太陽・光照射器・レーザー光線・高輝度照明等を直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[概要]

ルーペレンズ：光学レンズ

フレーム：チタンフレーム

[形状・構造等]

眼鏡レンズ部に埋め込まれた双眼ルーペ

種類：3.0倍、4.0倍、5.0倍、6.0倍、7.5倍、10.0倍
外観写真



[原理]

装着されているレンズから覗くことにより、作業視野の拡大像が得られる。

[仕様]

1)倍率

倍率	作業距離	焦点深度	視野範囲	重量
3.0倍	450mm	95mm	110mm	49～51g
	500mm	105mm	130mm	
	550mm	155mm	115mm	

倍率	作業距離	焦点深度	視野範囲	重量
4.0倍	450mm	80mm	85mm	50～52g
	500mm	90mm	95mm	
	550mm	100mm	105mm	

倍率	作業距離	焦点深度	視野範囲	重量
5.0倍	450mm	70mm	70mm	51～53g
	500mm	80mm	78mm	
	550mm	90mm	86mm	

倍率	作業距離	焦点深度	視野範囲	重量
6.0倍	450mm	55mm	50mm	51～53g
	500mm	65mm	56mm	
	550mm	75mm	62mm	

倍率	作業距離	焦点深度	視野範囲	重量
7.5倍	450mm	40mm	40mm	52～54g
	500mm	50mm	45mm	
	550mm	60mm	50mm	

倍率	作業距離	焦点深度	視野範囲	重量
10.0倍	450mm	30mm	30mm	56～58g
	500mm	37mm	35mm	
	550mm	45mm	40mm	

2)フレーム種類：ブルースフレーム、ソウルフレーム
スウィングフレーム、Jazz フレーム

【使用目的又は効果】

作業野の拡大像を得る為に使用する。

【使用方法等】

1. 本品装着後、頭部に緩みがないようストラップでしっかり固定する。
2. 下方角度を合わせる。
3. 拡大像を観察する。
※見えにくい場合は、ノーズパッドで調節すること。

【使用上の注意】

1. 本品は眼鏡レンズ部に埋め込まれた双眼ルーペのため、自身で位置や角度調整はしないこと。
2. 鏡筒部分は脱離や角度に影響を与える可能性があるため、直接把持しないこと。
3. 掛け外しは必ず両手でツル部分を持つこと。
4. 高い場所から落下させたり、ぶつけたりしないこと。
5. 浸水、薬液浸漬は行わないこと。
※清掃は付属のメガネ拭き、またはクリーニングシートをご使用ください。
6. かゆみ、かぶれ、湿疹などの症状が発生した場合は、本品の使用を止め、医師の診断を受けること。
7. フレーム、鼻パッド等の消耗品は経年変化により素材が劣化するため、必要に応じて交換すること。
8. 経時変化や使用方法等により、ネジの緩みや脱落、フレーム破断等の故障・損傷が発生した際は、自身で修理・接着等を行わず、販売店に連絡すること。
9. 本品は改造しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 使用しない時は専用のケースに入れて保管すること。
2. 落下するような場所へ保管しないこと。
3. 直射日光や高温多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 破損、ヒビ、汚染等がないか確認を行うこと。
2. 各部に緩みがなく、正常に機能するか確認を行うこと。
3. 光学系に曇りや汚れがないか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック
〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号
TEL：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381
製造業者：Admetec Solutions LTD. (Israel)