

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

シリカ 2 kg

(レジン床研磨材)

〔形状・構造及び原理〕

本品はレジン床の研磨に適した微粒と微粉を混合した粉末の研磨材です。

1. 形状

粉末

2. 組成

天然珪砂

天然粘土 (微粉状)

3. 原理

粘性成分 (天然粘土) によって、研磨成分 (天然珪砂) を研磨面及び回転ブラシに停留させ、物理的に研磨します。

〔使用目的・効能又は効果〕

レジン床の研磨

〔品目仕様等〕

1. 外観・性状

うす褐色のざらざらした微粉末

2. 粒子径

46 メッシュ (355 ミクロン) 以下

〔操作方法又は使用方法等〕

本品に適量の水を加えて泥状にしてレジン床に塗布し、回転ブラシで研磨します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 研磨に適した使用回転数の範囲内で使用してください。
- 2) 必要に応じて本品を使用する前に荒研磨をしておくことと研磨がより効果的に行えます。

〔使用上の注意〕

1. 使用注意

- 1) 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないでください。
- 2) 本品を〔使用目的・効能又は効果〕に掲げた用途以外には使用しないでください。

2. 重要な基本的な注意

- 1) 本品を使用する際には防じんマスク及び保護メガネ等を使用してください。
- 2) 万一目に入った場合にはすぐに流水で洗浄し眼科医の診断を受けてください。

〔貯蔵・保管方法及び使用期間等〕

〔貯蔵保管方法〕

- 1) 室温で保管してください。
- 2) 歯科の従事者以外は触れないよう適切に保管してください。

〔包装〕

〔包装単位〕 2 kg

〔製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等〕

製造販売業者及び製造業者: マケン石鹼株式会社

住所: 〒734-0004 広島県広島市南区宇品神田四丁目 5 番 13 号

電話番号: (082)251-5464 FAX: (082)251-5465

マケン石鹼株式会社