

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

iClean スワブ

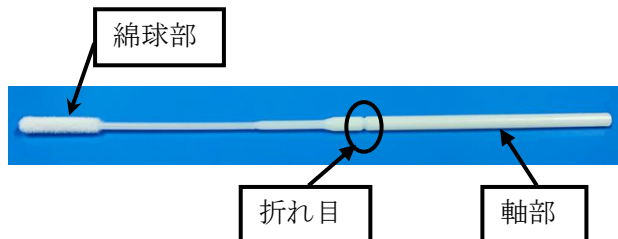
再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・ 軸部に、検体を採取した後、当該製品を容器に入れるための折り目がついている。

**＜材質＞**

綿球部：ナイロン
軸 部：ABS

【使用目的又は効果】

本品は、検査のために人体から検体を直接採取するために用いる医科用捲綿子である。

【使用方法等】

※ここでは、一般的な操作方法を示す。

1. 必要に応じて手袋を着用しておく。
2. 使用期限内であることを確認し、本品の汚染に注意して、個包装された袋を開け、軸部分をつまみ、綿球部に触れないように取り出す。
3. 検体を採取する部分に綿球部を当て、回転されながら検体を採取し、ゆっくり取り出す。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- ・ 検体を直接採取する際は、本品を強く押したり、過剰に折り曲げたりしないこと。（軸折れの原因となりうる。）

【使用上の注意】**＜重要な基本的注意＞**

- ・ 凍結や加熱をしないこと。
- ・ 綿棒の軸を折らないようにすること。小児等では、検体採取時に手や頭を動かすことがあるので、特に注意が必要である。
- ・ 検体採取時に軸部に負荷等をかけないこと。
- ・ 検体を採取する際は、採取する粘膜等の部位を傷つけないように注意が必要。
- ・ 開封後はすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して、安全な方法で適切に処分すること。
- ・ 必要に応じて、手袋、マスク、ゴーグル等を着用すること。
- ・ 併用する医薬品や医療機器がある場合は、それらの添付文書も併せて確認すること。

【保管方法及び有効期間等】**＜保管方法＞**

- ・ 水ぬれに注意し、高温多湿や直射日光を避けて、常温で保管すること。

＜有効期間＞

- ・ 直接の容器又は被包に記載してある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**＜製造販売業者＞**

前田産業株式会社
大阪府大阪市福島区福島 8-16-20
TEL：06-6440-4556

＜外国製造業者＞

クリーン(東莞)バイオテックシーオーエルティーディー
Cleanmo(Dongguan)Biotech Co.,Ltd.
国名：中華人民共和国