

機械器具(25) 医療用鏡  
一般医療機器 歯鏡 31776000

再使用禁止

## ディスポーザブルデンタルミラー

### 【禁忌・禁止】\*

#### (使用方法)

- ・再使用、再滅菌して使用しないこと。
- ・使用期限の切れたものを使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者 株式会社マイテクニカル  
TEL 093-475-2771  
FAX 093-475-2781
2. 製造業者 Shanghai Shengda Medical Applications Co., Ltd  
シャンハイ シェンダ メディカル アプリケーションズ  
(国名: 中華人民共和国)

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状:



#### 2. 原材料: ガラス (ハンドルはポプリプロピレン)

### 【使用目的又は効果】

本品は、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用前

- (1) 本品は滅菌済みであるので開封後直ちに使用できる。
- (2) 滅菌包装に破れなどの破損がないことを確認し、破損等が見つかった場合には使用しないこと。

#### 2. 使用時

口腔内診査又は圧排を行う。

#### 3. 使用后

本品は、単回使用であり再使用できない。使用後は適切に廃棄すること

#### <使用方法に関連する使用上の注意>

1. 使用前に本品の破損の有無を確認し、破損があった場合は使用をしないこと。
2. 本品に無理な力を加えないこと。無理な力を加えて破損が生じた場合には廃棄をすること。
3. 使用目的以外の目的で使用しないこと。

### 【使用上の注意】\*

#### <重要な基本的注意>

- ・本品に使用された原材料に対してアレルギーのある患者に使用しないこと。
- ・本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

- (1) 直射日光、高温、多湿を避けて、保管すること。
- (2) 油、酸、アルカリ性の物質に接触させないこと
- (3) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

#### 2. 有効期間: 滅菌日より2年間