

機械器具 (64) 歯科用探針
一般医療機器 歯科用探針 35812000 (歯科用キュレット 31904000/歯鏡 31776000/歯科治療用ピンセット 31814000)

再使用禁止

歯科用ディスプレイ基本セット

【禁忌・禁止】*

（使用方法）

- ・再使用、再滅菌して使用しないこと。
- ・使用期限の切れたものを使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要：

本品は、歯科診療で触診・組織の搔爬に用いる「ディスプレイデンタルプローブ」、口腔内診査又は圧排のために用いる「ディスプレイデンタルミラー」、口腔内に適用する創傷被覆・保護材等を把持する「ディスプレイデンタルピンセット」からなる。トレイに上記構成品とエブロン（医療機器対象外）が配置されて包装される。

2. 形状：


○ディスプレイデンタルプローブ



○ディスプレイデンタルミラー



○ディスプレイデンタルピンセット

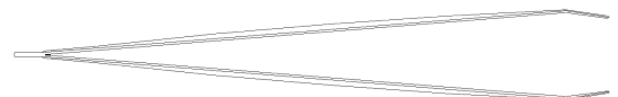

3. 原材料：

- ディスプレイデンタルプローブ
ステンレス鋼（把持部はポリプロピレン）
- ディスプレイデンタルミラー
ガラス（ハンドルはポリプロピレン）
- ディスプレイデンタルピンセット
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、歯科診療で触診・組織の搔爬に用いる手持型の器具、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具、口腔内に適用する創傷被覆・保護材等を把持する歯科用手用器具からなるキット品である。

【使用方法等】*

1. 使用前

- (1) 本品は滅菌済みであるので開封後直ちに使用できる。
- (2) 滅菌包装に破れなどの破損がないことを確認し、破損等が見つかった場合には使用しないこと。

2. 使用時

- ディスプレイデンタルプローブ
口腔内検査や治療において両先端の細い作業部分にて触診、組織の搔爬を行う。
- ディスプレイデンタルミラー
口腔内診査又は圧排を行う。
- ディスプレイデンタルピンセット
創傷被覆・保護材等を把持する。

3. 使用后

本品は、単回使用であり再使用できない。使用後は適切に廃棄すること

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 使用前に本品の破損の有無を確認し、破損があった場合は使用をしないこと。
2. 本品に無理な力を加えないこと。無理な力を加えて破損が生じた場合には廃棄すること。
3. 使用目的以外の目的で使用しないこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品に使用された原材料に対してアレルギーのある患者に使用しないこと。
- ・本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 直射日光、高温、多湿を避けて、保管すること。
- (2) 油、酸、アルカリ性の物質に接触させないこと
- (3) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

2. 有効期間：滅菌日より 2 年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者 株式会社マイテクニカル
TEL 093-475-2771
FAX 093-475-2781
2. 製造業者 Shanghai Shengda Medical Applications Co., Ltd
シャンハイ シェンダ メディカル アプリケーションズ
(国名：中華人民共和国)