

WiSM ニトリルグローブ エコバリュー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本製品を複数の患者に対して再利用しないこと〔汚染・感染の恐れがあるため〕
- ・本製品を再利用しないこと〔製品が破損や性能が変化するおそれがあるため〕
- ・再使用禁止

【形状、構想及び原理等】

本製品は左右一対からなる合成ゴムを使用した検査・検診用の未滅菌の手袋であり、術者が手に装着して使用するものである。

寸法	厚み	中指の長さ	長さL	幅W
SS	>0.05mm	77±2mm	235±5mm	70mm±10mm
S	>0.05mm	79±2mm	235±5mm	80mm±10mm
M	>0.05mm	82±2mm	235±5mm	95mm±10mm
L	>0.05mm	85±2mm	235±5mm	110mm±10mm

【使用目的】

本製品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素素材手袋である。

【使用方法等】

（使用前）

1. 取出口から手袋を 1 枚取り出し。
2. 手首部分にあたるカフ上端表面のみに触れ、着用する。
3. 2 枚目の手袋を取り出し、2. にならい着用する。
4. 手袋を着用した手で前腕の皮膚に触れないように、折りたたまれたカフを開き、手首まで着用する。

（使用后）

1. 片方の手袋を手首の高さでつまんで、前腕皮膚に触れずに取り外し、手袋を裏返しにする。
2. 手袋を着用している手で取り外した手袋を待ち、手袋を取り外した手の指を着用側の手袋と手首の間に差し込みしながら取り外し、先に取り外した手袋に折り込む。
3. 取り外した手袋を廃棄する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 適切なサイズの手袋を選択する。
- 同一の患者のみに使用すること。
- 穴、破損、損傷等異常が認められた場合には使用を中止、新しいものに交換すること。
- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すること。
- 化学薬剤浸透に対する抵抗性試験結果を確認し、その範囲内で使用すること。
- 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする恐れがあるので確認の上、使用すること。
- 使用后廃棄する場合は、院内の手順に従い適切に対処すること。

<重要な注意事項>

- ・本品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎の症状がでる恐れがあり、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- ・製品本体の特性上、鋭利なものに接触すると損傷する恐れがあるため、使用前に損傷がないことを十分に確認し使用すること。

<相互作用>

- ・特殊な薬品の使用により、本製品が膨潤・浸透する恐れがあるため、状態を十分に確認の上、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 涼しく乾燥した状態で保管する。
- 直射日光、熱、石油製品は避けて保管すること。
- 10 度から 40 度の室温にて保管する。

[有効期間]

製造より 5 年（自己認証による）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：万栄国際株式会社

所在地：東京都新宿区市谷薬王寺町 71 番 7-505 号

TEL:03-3268-9340

製造業者：山東英科医療製品有限公司

（中華人民共和国）