

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 気管支吸引用カテーテル (JMDN コード : 31249000)

## 吸引用カテーテル

再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

肺癌、結核、無気肺、活動性肺出血等がある患者には使用しないこと。  
再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

PLAIN コネクター 2 ラテラルアイズ

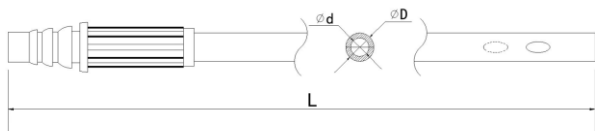

#### 2. 寸法

サイズ	外径	コネクター カラー	全長
8Fr	2.67mm	ライトブルー	400mm または 500mm
10Fr	3.33mm	ブラック	
12Fr	4.0mm	ホワイト	
14Fr	4.67mm	グリーン	

#### 3. 体に接触する部分の原材料

PVC (ポリ塩化ビニル)

#### 4. 原理

負圧源と接続することにより、吸引、排液及び異物除去等を行う。

### 【使用目的又は効果】

気管内チューブ若しくは気管切開チューブを介して、又は経鼻的若しくは経口的に、咽頭、喉頭、気管又は気管支等に挿入し、吸引、排液及び異物除去等に用いる。

### 【使用方法等】

1. 使用する前に、パッケージ、製造ロット、製造年月日を確認してください。
2. 患者の体と年齢に基づいてモデルを選択してください。
3. 一般的な予防措置（手袋など）を行ってください。
4. 吸引チューブコネクターを負圧源に接続し、接続部の硬さと締め付け具合を確認します。
5. 人体の希望する吸引位置に挿入し、負圧源を起動して本品の使用を開始します。
6. 医師が指示したその他の要件は、管理部に要求します。
7. 使用後は廃棄し、医療廃棄物として集中処理してください。

### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) E0 滅菌済みのため、再度消毒したり、再使用しないこと。
- (2) DEHP 不使用。
- (3) パッケージや製品が破損していたり、汚染されていたり、使用期限を過ぎている場合は、使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
直射日光を避け、室温で保管すること。
2. 有効期間  
滅菌後 3 年（自己認証による）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：万栄国際株式会社  
電話番号：0797-88-3988

製造業者：SHANDONG HENGLI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD  
(中華人民共和国)