

DSレジン

【禁忌・禁止】

本材又はメタクリレート系ポリマーまたはモノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には絶対に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本材は、下記成分により構成される。

- 1) 粉：メタクリル酸エステル重合体の細粉
- 2) 液：メタクリル酸エステルの単量体
- * 3) 粉色调：

<プレタイプ>

No. PP1 プレピンク1 (繊維入り)

<レギュラータイプ>

No. 1 クリア

No. 3 ピンク

No. 7 リアルピンク (繊維入り)

No. 8 ディープピンク (繊維入り)

<ハイグレードタイプ>

No. 5H コーラルピンク (繊維入り)

<スイートタイプ>

No. 3S ピーチピンク

No. 5S チェリーピンク (繊維入り)

<シアタイプ>

No. AB アクアブルー

No. FP フェアリーピンク

<トゥースタイプ>

No. A1

No. A2

No. A3

*【使用目的又は効果】

義歯床用合成樹脂。

** DSシステムの場合、必須材料である。

*【使用方法等】

- 1) レジンの粉液比は、粉11gに対して液4g(約4.2cc)です。
※粉は少なくとも、多くてもよい義歯は得られません。
- 2) 液を専用のレジン混和袋に入れ、粉を少しずつ加えていきます。次に袋の中の空気を抜いてチャックを閉め、粉と液が馴染むよう約10秒～15秒間手で揉んだ後、スパチュラ等でレジンと袋の底を集めてください。
- 3) 混和後、DSレスタSで餅状化を行ってください。(餅状維持時間は、約20分間です)
※詳細な操作方法につきましては、DSシステムに付属のDSガイドブックをご参照ください。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ** 上下輪共に【DSガードストーン】で埋没してください。【DSガードストーン】以外の埋没材を使用されますと完成義歯の品質が確保されません。
- ・使用前には必ず、DSシステムに付属のDSガイドブックを一読すること。
- ・本材を扱う際には、皮膚などに付着することをDS防ぐため、保護めがねと保護手袋を必ず着用すること。

- ・開封後は、できるだけすみやかに使用すること。
- ・DSレジン以外のレジン粉や液との混用は絶対にしないこと。
- ・一度取り出した粉・液は、元の容器に戻さないこと。
- ・DSレジン液は、必ず内蓋をしたうえで保管すること。
- ・粉・液の保管、管理、および餅状レジンの作製には、DSレスタSを使用すること。
- ・一度注入した餅状レジンには、必ず廃棄すること。
- ・粉は1kg袋をよく振り、中身を均一にしてから補充すること。なお、補充する前に360gボトルは、必ず中身を空にすること。
- ・液は必ず使い切るようにし、絶対補充しないこと。
- ・粉・液はDSレスタS内で10時間以上温度管理を行った後、使用すること。
- ・本材は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ・本材は可燃性であるため、必ず火気を避けて使用すること。
- ・本材を使用する際には、適切な換気(1時間あたり数回の換気)がなされている場所で使用すること。
- ・本材に対して過敏症(発疹や皮膚炎)などの既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした際は使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ・液又は液と粉の混合物は、直接素手で触らないこと。また、皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期限等】

1) 貯蔵・保管方法

- ・本材の未開封品は、冷暗所に保管すること。
- ・使用及び保管場所は、消火装置を備え、一つの保管庫に多量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。

2) 有効期間・使用の期限

本材は、包装に記載の使用期限※までに使用すること。

〔記載の使用期限は自己認証(当社データ)による〕
※(例“EXP. 2011.05”は、“使用期限2011年5月”を示す)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：三木化学工業株式会社

住 所：京都府京都市中京区西ノ京西中合町18

発 売 業 者：オーディック株式会社

住 所：〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島7-14-20

大阪みづほビル内

電 話 番 号：06-6451-7385

受 付 時 間：9:00～17:00(土・日・祝を除く)