

ディスプレイケーブルピンセット差替えコード

再使用禁止

\* 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



商品コード	商品名
07-785-03	双極性止血鑷子差替コード(5本入)

\* 【使用目的又は効果】

本品は、手術用電気機器として使用されるバイポーラ電極と、これらに接続し制御する電気手術器との間に高周波電流を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられるコードである。

\* 【使用方法等】

1. 本品が滅菌済であることを確認します。
2. プラグを電気手術器のバイポーラ出力端子に差込み、他端のソケットにバイポーラ電極を差込みます。
3. 使用を終えたら再使用できませんので、適切に処分してください。

<組み合わせて使用可能な医療機器>

本品は、以下の承認、認証及び届出された機器と併用しての使用が可能です。

販売名	承認／認証／届出番号
電気手術器 MESU-150B	21900BZX00713000
ミズホ 電気手術器 TFT-8B	20400BZZ00630000
ミズホ 電気手術器 MESS-2000	223AGBZX00127000
バイポーラコアギュレータ MICRO-3F	20900BZZ00480000
バイポーラコアギュレータ MICRO-3Plus	21900BZX00715000
白金双極性止血鑷子	22000BZX00708000
双極性止血鑷子	22000BZX00706000

注 上記以外の製品への使用はお問い合わせください。

\* 【使用上の注意】

1. 本品の許容最大ピーク高周波電圧は 500 Vp です。電気手術器の最大出力電圧を確認し、許容範囲内のモード、出力設定で使用してください。
2. 電気手術器が、正常な操作設定で正しく動作しているときに明らかな出力低下又は異常が発生した場合には、本品とその接続及びバイポーラ電極の先端部に異物の付着がないことを確認してください。

\* 【保管方法及び有効期間等】

高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

\* 【保守・点検に係る事項】

1. 使用前点検
  - ① ひび割れ、破損、変形がないことを確認してください。
  - ② 接続端子部分の破損や湾曲がないことを確認してください。
2. 洗浄方法
  - ① 消毒用エタノールを浸した清潔な柔らかい布等で清拭してください。
  - ② 本品は液体に浸さないでください。
3. エチレンオキサイドガス滅菌  
本品は未滅菌品です。使用に際しては必ず清浄にし、標準的滅菌条件又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件で行ってください。

\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社  
TEL 03(3815)3096  
製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償交換いたします。但し、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。