

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

両脚固定バンド

【警告】

クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）の患者、又はその疑いのある患者に使用した器具を再使用する場合には、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。[二次感染の恐れがあります]

* 【禁忌・禁止】

1. 化学薬品の使用禁止
本品を化学薬品に曝すことは避けること。[腐食による損傷の原因となります]
2. 粗雑な取扱いの禁止
本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱いはしないこと。[器具器械の寿命を著しく低下させます]
3. 磨き粉や金属ウールの使用禁止
洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで器具の表面を磨くことはしないこと。[本品表面に擦過傷を生じ、錆や腐食の原因となります]
4. アルカリ性・酸性洗剤・家庭用洗剤の使用禁止
洗浄に使用する洗剤は必ず中性洗剤（pH6～8）を使用し、アルカリ性や酸性の洗剤は使用しないこと。また、医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと。[脱色や腐食の原因となります]

** 【形状・構造及び原理等】

形状・構造



商品コード	商品名
08-084-00	両脚固定バンド

原材料：ビニールレザー・ウレタン・ナイロン・ステンレス鋼

** 【使用目的又は効果】


本品は、手術台に付属するアクセサリである。患者の脚部を手術台に固定する。

** 【使用方法等】

1. 使用前

本品のご使用前には必ず点検を行い、適切な条件で必ず洗浄し、消毒を行ってください。（保守・点検に関わる事項を参照ください）

2. 使用中

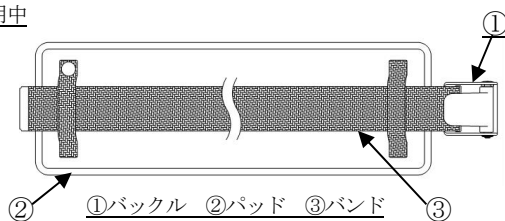

- (1) ②パッドを患者の体位に合わせて取り付けてください。
- (2) ③バンドを手術台に巻き付けてください。
- (3) ③バンドを①バックルに通して固定してください。

** 【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

不具合事象

- ・化学薬品等の使用による劣化・腐食・孔食
- ・腐食や孔食による折損・破損

有害事象

- ・折損や破損片の体内遺残

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

2. 耐用期間

本製品は消耗品です。固定力に劣化が認められた場合は速やかに新しい製品と交換をしてください。

* 【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前の点検事項

動作、機能チェックの実施

本品は、日常点検及び使用前点検により、正常に機能することを確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3096

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場