

器29 電気手術器

一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ (70657000)

バイポーラ用フットスイッチケーブル


【禁忌・禁止】

1. ケーブルを制御装置などに巻きつけないこと。【断線の原因となります】
2. ケーブルを持って操作したり、無理に折り曲げたり、無理な力を与えたりしないこと。【断線の原因となります】

【形状・構造及び原理等】


形状・構造

1. シングルケーブル

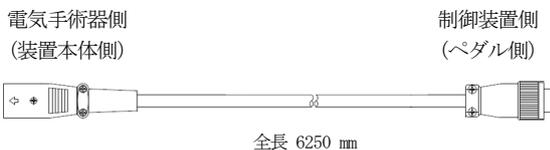

商品コード	商品名	備考
08-501-11	バイポーラ用フットスイッチケーブルA	MICRO-3F 用 (商品コード: 07-787-01)
08-501-12	バイポーラ用フットスイッチケーブルB	MICRO-3Plus 用 (商品コード: 07-787-20)
08-501-13	バイポーラ用フットスイッチケーブルC	電気手術器側コネクタ : 3極
08-501-14	バイポーラ用フットスイッチケーブルD	電気手術器側コネクタ : 4極
08-501-15	バイポーラ用フットスイッチケーブルE	電気手術器側コネクタ : 4極 灌流用信号のみ

2. ダブルケーブル

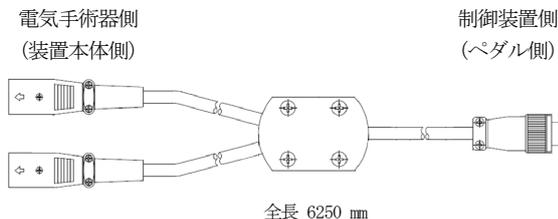

商品コード	商品名	備考
08-501-16	バイポーラ用フットスイッチケーブルWA	電気手術器側コネクタ : 4極、3極
08-501-17	バイポーラ用フットスイッチケーブルWB	電気手術器側コネクタ : 3極、3極

* 【使用目的又は効果】

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられるケーブルである。一次電源に対する延長の用途を除く。

* 【使用方法等】

<使用前の準備>

1. 本品は電気手術器と接続するケーブルであり、使用する電気手術器との接続を確認する。
2. 本品を制御装置（ペダル）の接続口に接続する。
3. 本品を電気手術器の取扱説明書に従って、電気手術器（装置本体）に接続する。
4. バイポーラ出力ペダルを踏むと、バイポーラモードの出力が、それぞれ踏んでいる間だけ発生することを確認する。

<使用方法>

1. バイポーラ出力ペダルでバイポーラモードの出力操作を行う。
2. これ以降の操作は電気手術器の操作に準じて行う。
3. 使用後は、本品を電気手術器および制御装置から取外し、消毒用アルコール等で清拭きする。

* 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用する電気手術器の添付文書、取扱説明書を必ず参照すること。
- (2) 破損や亀裂又は劣化がないことを確認し、異常がある場合は使用しないこと。
- (3) 装置との接続が正確でかつ安全であることを確認すること。
- (4) ケーブルを持って持ち運びをしないこと。
- (5) 落としたり、けとばしたり、たたいたりしないこと。
- (6) 分解しないこと。
- (7) 水や油につけないこと。
- (8) 装置からケーブルを取外す際は、ケーブルを引っ張らず、常にコネクタ部分を持って取外すこと。

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は水濡れに注意し、高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：5年（自己認証）

* 【保守・点検に係る事項】

1. 適切な消毒剤を用いて清拭法にて消毒すること。適合性や希釈濃度については消毒剤の製造元の指示に従うこと。
2. 液体に浸さないこと。
3. 滅菌しないこと。

<業者による保守点検事項>

本器械を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3096

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

* 【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから一年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。