

器29 電気手術器

一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ (70657000)

MC-660接続ケーブル

【禁忌・禁止】

ケーブルを制御装置などに巻きつけないこと。[断線などの原因となります]


【形状・構造及び原理等】

形状・構造

制御装置側

装置本体側

(フットスイッチ側)

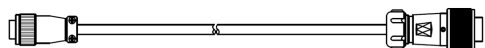

ケーブル長 6.2m

商品コード	商品名
08-502-01	MC-660 接続ケーブル 7300B 用

【使用目的又は効果】

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し制御する装置との間に信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられるケーブル、スイッチ及びアダプタ等をいう。一次電源に対する延長の用途を除く。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- (1) 外観に異常がないことを確認する。
- (2) 本品の制御装置側コネクタを制御装置と接続する。
- (3) 本品の装置本体側コネクタを装置本体と接続する。
- (4) 制御装置のフットスイッチを操作すると、装置本体が動作することを確認する。

2. 使用方法

- (1) 装置本体及び制御装置の取扱説明書に従い、制御装置のフットスイッチを操作し、装置本体を操作する。
- (2) 使用後は、本品を制御装置および装置本体から取り外す。
- (3) 必要に応じて、消毒用アルコールで湿らせたきれいな布を用い、清拭する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 装置本体の添付文書、取扱説明書を参照し、使用すること。
- (2) 破損や亀裂、劣化がないことを確認し、異常がある場合は使用しないこと。
- (3) 制御装置、装置本体との接続が正確でかつ安全であることを確認すること。
- (4) ケーブルを持って持ち運びをしないこと。
- (5) 落としたり、けとばしたり、引っ張ったりしないこと。
- (6) 分解しないこと。
- (7) 水や油、液体につけないこと。
- (8) 装置からケーブルを取外す際は、ケーブルを引っ張らず、常にコネクタ部分を持って取外すこと。(ロック機構あり)

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：5年（自己認証）

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前の点検事項

(1) 動作、機能チェックの実施

本品は、日常点検及び使用前点検により、正常に機能することを確認してください。

(2) 外観確認

断線、亀裂等がないことを確認してください。

2. 使用後の点検事項

(1) 清拭

消毒用アルコールで湿らせたきれいな布を用い、清拭してください。

(2) 外観確認

断線、亀裂等がないことを確認してください。

<業者による保守点検事項>

本品を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3097

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。