

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

側部支持器（側部パッド 若杉）


【警告】

＜使用方法＞

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因となることがあります]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

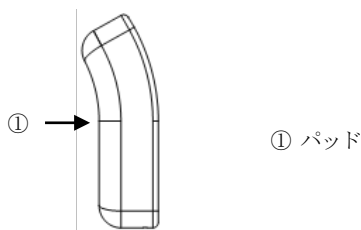

商品コード	商品名
08-080-62	側部パッド 若杉

2. 患者体重（目安）

135 kg 以下

3. 原材料

①：ウレタンフォーム

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリである。

* 【使用方法等】

1. 側部支持器用パッドの取り付け

側部パッドをパッド取り付け部へ直接差し込み、パッド固定ネジでパッドを固定します。（側部パッドとの嵌合を確認します）

2. 対応可能な側部支持器

使用可能な側部支持器（届出番号：13B1X00306G11182）は次表のとおりです。

商品コード	商品名
08-080-31	フレキシブル側部支持器 本体

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1-1 本品と側部支持器が固定されていることを確認してください。
- 1-2 指定された側部支持器以外には使用しないでください。
- 1-3 衛生のため、患者が本製品に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- 1-4 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
- 1-5 損傷のあるパッドは交換してください。（損傷のあるパッドに水分が浸み込み、雑菌等が繁殖するのを防ぐため）

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：2年[自己認証（自社データ）による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」、「正常に機能すること」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお問い合わせ

本品が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

本品を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3097

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。