

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

ベースユニットアタッチメント

【警告】

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]

【禁忌・禁止】

< 併用医療機器 >


1. 弊社製手術台以外では使用しないこと。
[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2. 弊社指定の併用機器以外では使用しないこと。
[他機器での使用可能は確認していません。]

< 使用方法 >

レール固定部の空締め禁止。[変形の原因となります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

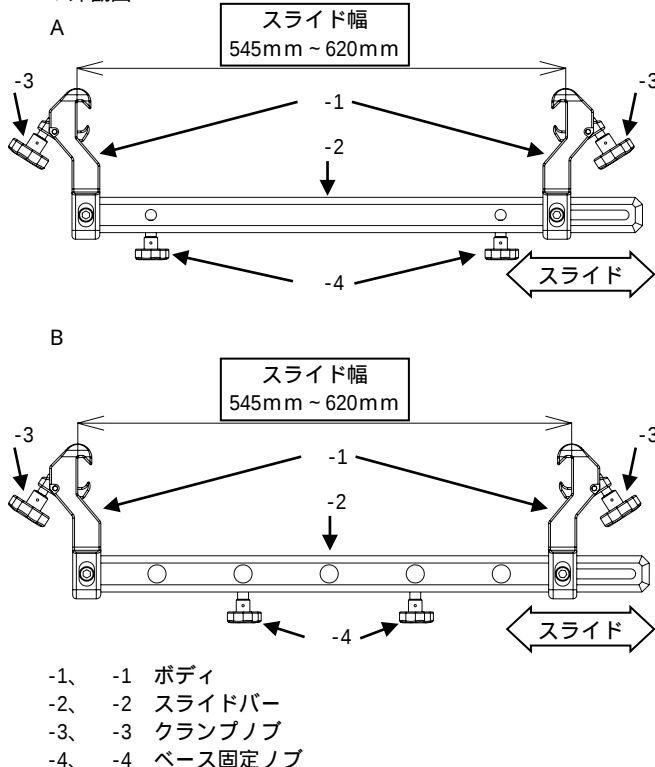

記号	商品コード	商品名
A	18-075-01	サイドレールベースユニットアタッチメント φ12.5mm タイプ
B	18-075-02	サイドレールベースユニットアタッチメント φ20mm タイプ

2. 質量

2.9 kg

3. 原材料

部品番号	部品名	原材料
-1、 -1	ボディ	アルミニウム合金
-2、 -2	スライドバー	
-3、 -3	クランプノブ	ステンレス鋼、樹脂
-4、 -4	ベース固定ノブ	

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。

**【使用方法等】

*

1. 指定併用機器

A:18-075-01 サイドレールベースユニットアタッチメント φ12.5mm タイプ	
(1)	弊社製 手術台
(2)	製造販売届出番号: 13B1X00306N10025 販売名: 延長レール
(3)	製造販売届出番号: 13B1X00306G00383 販売名: 多目的ヘッドフレーム 商品コード: 07-952-00 商品名: M 式頭部支持器 (頭受アーム)
(4)	製造販売届出番号: 13B1X00306G00388 販売名: X 線透過多目的ヘッドフレーム 商品コード: 07-952-01 商品名: ヘッドアームベース
(5)	製造販売届出番号: 13B1X00306G10896 販売名: 多目的ヘッドフレーム 商品コード: 07-952-03 商品名: フレキシブルヘッドアームベース
(6)	製造販売届出番号: 13B1X00306G11200 販売名: EZ スカルクランプ システム 商品コード: 82-001-01 商品名: EZ ベースユニット

B:18-075-02 サイドレールベースユニットアタッチメント φ20mm タイプ	
(1)	弊社製 手術台
(2)	製造販売届出番号: 13B1X00306N10025 販売名: 延長レール
(3)	製造販売届出番号: 13B1X00306G00383 販売名: 多目的ヘッドフレーム 商品コード: 07-952-05 商品名: テーブルアタッチメント 2080 用
(4)	製造販売届出番号: 13B1X00306G00388 販売名: X 線透過多目的ヘッドフレーム 商品コード: 07-952-07 商品名: ヘッドアームベース 2080 用

2. 手術台への取り付け方法

2-1 手術台の頭部板を取り外します。

2-2 ベースユニットアタッチメント本体のボディをスライドさせて手術台両端のサイドレール幅に合わせて調節し取り付けます。この時、取り付け向きが間違っている場合ベースユニットが取り付けられないことがありますので正しい取り付け向きの図を参照しスライドバーの平坦な面が頭側になるよう取り付けてください。

必要に応じて延長レールを手術台サイドレールに取り付けてください。

正しい取り付け向き



誤った取り付け向き



2-3 クランプノブを締め込み、確実に固定します。

下記のいずれかの状態であることを確認してください。

- ・ボディの取り付け確認線と手術台サイドレール(又は延長レール)の上面が一致している。
- ・ボディの取り付け確認線と手術台サイドレール(又は延長レール)の上面との隙間が両面で均等になっている。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3097

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

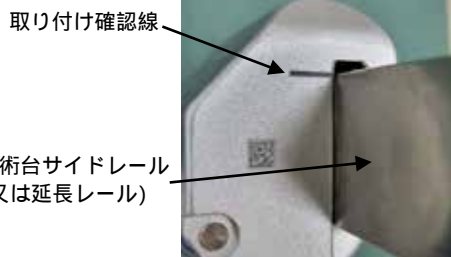

3. 各種ベースユニットの取り付け方法

3-1 スライドバーの接続孔に各種ベースユニットを取り付けます。

3-2 ベース固定ノブを締め込み、各種ベースユニットを固定します。

3-3 ベースユニットの使用方法に従って構成部品等を取りつけます。
ベースユニットの詳細な使用方法は、ベースユニットの取扱説明書を参照してください。

* 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に傷害が起きるおそれがあります。
- (2) ベースユニットは、各種ベースユニットの取扱説明書に従って使用してください。
- (3) 手術台を作動するときには他の手術台アクセサリやテーブルトップ、床及びその他周辺機器との接触・干渉に注意してください。

2. その他の注意事項

手術台に装着する際には、手術台の頭部板を外してから取り付けてください。手術台付属の頭部板との併用はできません。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。振動、衝撃（運搬時を含む）等を与えないように注意してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：5年

[自己認証（自社データ）による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

< 使用者による保守点検事項 >

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。